

**МАНОМЕТРЫ МЕДИЦИНСКИЕ
ММ – «ТРИВЕС – ПЧЗ-М»**

ТУ 9441-002-33094849-2005

**ЭТИКЕТКА****1 НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1 Манометры медицинские ММ – «ТРИВЕС – ПЧЗ-М» (в дальнейшем – манометры) предназначены для измерения давления воздуха в компрессионной манжете измерителей артериального давления.

1.2 Область применения – комплектование измерителей артериального давления и другой медицинской техники.

1.3 Манометр может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности до 100% при температуре 25 °С.

2 ИСПОЛНЕНИЯ

- манометр ММ1-С – «ТРИВЕС – ПЧЗ-М» - металлический корпус с корректировкой нуля;
- манометр ММ1-П – «ТРИВЕС – ПЧЗ-М» - пластмассовый корпус с корректировкой нуля;
- манометр ММ2 – «ТРИВЕС – ПЧЗ-М» - металлический корпус без корректировки нуля;
- манометр ММ3 – «ТРИВЕС – ПЧЗ-М» - металлический корпус без корректировки нуля, совмещенный с нагнетателем.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1 Диапазон измерений от 20 до 300 мм рт. ст.;
- 3.2 Цена деления шкалы 2 мм рт. ст.;
- 3.3 Допускаемая основная погрешность в любой точке шкалы составляет ± 3 мм рт. ст.
- 3.4 Масса манометра не более 0,26 кг.
- 3.5 Габаритные размеры, не более

ММ1-С – «ТРИВЕС – ПЧЗ-М»	60 x 105 x 36,5
ММ1-П – «ТРИВЕС – ПЧЗ-М»	60 x 105 x 36,5
ММ2 – «ТРИВЕС – ПЧЗ-М»	50 x 93 x 35
ММ3 – «ТРИВЕС – ПЧЗ-М»	70 x 178 x 62.

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При включении манометра в систему измерителя артериального давления **запрещается** создавать давление свыше 300 мм рт. ст., что может привести к выходу манометра из строя, а так же нагнетать воздух в манжету в нерабочем, развернутом состоянии.

4.2 Дезинфекцию производить 3 %-ным раствором перекиси водорода, используя для этого мягкую ткань.

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Манометры состоят из металлического или пластмассового корпуса с закреплёнными в них мембранным блоком и трибно-секторным механизмом.

5.2 Перед работой присоединить к штуцеру манометра трубку от компрессионной манжеты и установить стрелку в нулевое положение поворотом шкалы (при наличии в исполнении корректора нуля). Ваш манометр готов к работе.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Манометр ММ – «ТРИВЕС – ПЧЗ-М» - 1 шт.
Этикетка - 1 шт.
Упаковка - 1 шт. (допускается групповая упаковка).

7 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ


7.1 Упакованные манометры допускается транспортировать всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Температура транспортирования от минус 50 до плюс 50 °С. Во время транспортирования манометры необходимо оберегать от резких ударов и толчков.

7.2 Манометры рекомендуется хранить в упаковке. Воздух в помещении не должен содержать паров и газов, вызывающих коррозию деталей манометров. Температура хранения от плюс 5 до плюс 40 °С, относительная влажность воздуха до 80% при температуре плюс 15°С.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

8.1 Манометр медицинский ММ – «ТРИВЕС – ПЧЗ-М» соответствует техническим условиям ТУ 9441-002-33094849-2005 и признан пригодным для эксплуатации.

ОТК

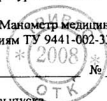

№

38730

-- ИЮН 2008

Дата выпуска

9 ПОВЕРКА

9.1 После ремонта, а также раз в год в процессе эксплуатации манометр подлежит метрологической поверке в соответствии с методикой поверки Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Поверка манометра, находящегося в личном пользовании потребителя, осуществляется местными органами Государственной метрологической службы РФ или предприятиями «Медтехника».

Манометр прошел первичную поверку.

10 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

Дата поверки	Заключение по результатам поверки	ФИО, подпись, отпечаток клейма поверителя
-- ИЮН 2008		

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие манометра требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации манометра 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

При отсутствии отметки торгующей организации о дате продажи, срок гарантии начисляется со дня выпуска манометра.

В случае нарушения пломбы на манометре претензии к качеству работы манометра не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Срок службы до списания не менее 6 лет.

При неисправности, обнаруженной в течение гарантийного срока, обращаться по адресу:

Почт. Адрес; 197101, г. Санкт-Петербург, а/я 978.

Дата продажи