

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Усовершенствованный  
фонендоскоп  
«CS Healthcare модель CS-404»  
производства фирмы  
Wenzhou Longwan Dekang  
Medical Instrument Co., Ltd (КНР)**



**ME20**



**При покупке требуйте правильного заполнения  
гарантийного талона, находящегося в середине  
настоящего Руководства по эксплуатации!**

**Благодарим Вас за покупку!**

Удлиненная трубка (56 см) не ограничивают свободу Ваших движений. Оригинальная форма головки фонендоскопа не только позволяет надежно и удобно удерживать его, но в комплексе с чувствительной большой диафрагмой позволяет прослушивать сердечный шум высокой частоты.

- **БОЛЬШАЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ДИАФРАГМА** обеспечивает высокую разрешающую способность при аускультации сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, а также внутренних органов брюшной полости.
- **ПЛАСТИКОВОЕ КОЛЬЦО ДИАФРАГМЫ** обеспечивает наилучший контакт диафрагмы с прослушиваемой зоной, а также не создает эффект холодного материала.
- **ЭЛАСТИЧНЫЕ ОЛИВЫ НАУШНИКОВ** обеспечивают плотное и комфортное соприкосновение с ушными отверстиями.

## **Как пользоваться фонендоскопом**

- Легкое постукивание пальцем по диафрагме позволит Вам определить готовность прибора к работе.
- Теперь Вы можете проводить осмотр при помощи фонендоскопа.

### **Комплект поставки:**

1. Нагрудная часть с большой диафрагмой . . . . . 1 шт.
2. Бинауральные хромированные трубки с эластичными наконечниками среднего размера для ушей . . . . . 1 пара
3. Трубка с усиленными стенками . . . . . 1 шт.

Фонендоскоп «CS Healthcare модель CS-404» производства фирмы «Венчжоу Лонгван Деканг Медикал Инструмент Ко., Лтд.» № 107 Ксиаоту Стрит, Хайбин Таун, Лонгван Дистрикт, Венчжоу Сити, Китай, соответствует всем требованиям безопасности, предусмотренным законодательством РФ.

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ**

Регистрационное удостоверение:

ФС № 2004/1515 от 29.11.04 г.

**ГОССТАНДАРТ РФ**

Орган по сертификации средств информатизации, приборостроения, медицинской техники и электрооборудования (ОС «Сертинформ ВНИИНМАШ»)

Сертификат соответствия № РОСС CN.ME20.A02313

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-92 (р.3)

**СРОК ГАРАНТИИ 2 года**

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии 2 года

## ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

1. Настоящая гарантия действительна только в том случае, если гарантийный талон правильно заполнен продавцом, в частности, если имеется четко проставленная печать продавца и дата продажи. Гарантийный срок изделия исчисляется с даты покупки. Условия гарантии действуют в рамках Закона РФ «О защите прав потребителей», регулируются законодательством страны и ни в коей мере не ограничивают права потребителей.
2. Гарантия теряет силу в случаях:
  - нарушения требований Руководства по эксплуатации;
  - наличия механических повреждений, попадания в аппарат влаги или возникновения дефектов, вызванных стихийными бедствиями;
  - самостоятельного вскрытия измерительного прибора и его составляющих владельцем или третьими лицами.
3. Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности), вызванные естественным износом составных частей измерительного прибора, имеющих ограниченный срок службы.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 «...приборы и аппаратура медицинские входят в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

В соответствии с Законом «О защите прав потребителя» «...изготовитель или организация, выполняющая функции изготовителя на основании договора с ним, обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя, а в случае необходимости **провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.**

При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара изготовитель или организация, выполняющая функции изготовителя, обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара установлено, что недостатки возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения им установленных правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, потребитель обязан возместить изготовителю или организации, выполняющей функции изготовителя, расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара».

# Гарантийный талон

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Штамп магазина \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

Изделие во всех режимах работы проверялось в присутствии покупателя

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Дата обращения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Заключение мастера, выполненные работы \_\_\_\_\_

Дата выдачи (возврата)  
прибора потребителю « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Подпись \_\_\_\_\_ Работу принял \_\_\_\_\_  
или штамп мастера (подпись клиента)